



RO GHID RAPID PENTRU UTILIZAREA ATELEI PENTRU VIȚEI

SCOPUL ATELEI:

Atela pentru viței este utilizată pentru stabilizarea membrelor la viței nou-născuți care suferă de contractură congenitală a tendoanelor (Neuromyodysplasia congenita):

- Corectarea deformărilor de flexie cauzate de tendoane și/sau mușchi scurtați
- Începerea tratamentului imediat după fătare
- Suport rapid pentru a ajuta vițelul să meargă, să stea în picioare și să sugă lapte

MATERIALE NECESARE:

- Atelă curată pentru viței cu benzi de prindere cu scai (Velcro)
- În cazurile deosebit de grave: material de bandaj (ex. bandaj elastic cu scai sau bandaj autoadeziv) pentru înfășurarea suplimentară a atelei

PAȘII DE APLICARE:

1. PREGĂTIRE

- Separați vițelul de mamă pentru a vă asigura propria siguranță
- Imobilizați vițelul (dacă este necesar, cu ajutorul unei a doua persoane)
- Verificați membrul pentru răni sau modificări ale pielii

2. APLICAREA ATELEI

- Atela se aplică din față, cu deschiderea largă orientată în jos
- Trebuie să acopere de la copită până chiar sub articulație
- Întindeți membrul și fixați atela cu benzile de scai
- Atela trebuie să fie bine fixată, dar să nu restricționeze circulația sângelui

DURATĂ & MONITORIZARE

- Durată de utilizare: în funcție de gravitate, 14 până la 28 de zile
- Verificați zilnic fixarea corectă a atelei
 - Examinați pielea pentru puncte de presiune
 - Observați starea generală a vițelului

În caz de inflamații, escare de presiune sau lipsa progresului în vindecare contactați medicul veterinar!

OBSERVAȚII IMPORTANTE

- În caz de incertitudine, consultați întotdeauna medicul veterinar
- Corectarea timpurie crește semnificativ șansele de vindecare
- Monitorizarea zilnică a animalelor este absolut esențială



URMĂRIȚI VIDEOCLIPUL

